

## Anwendung des ANIVET-Wundfix-Systems bei Kolikpatienten

Die postoperative Wundheilung bei Kolikpatienten stellt hohe Anforderungen an das Klinikmanagement. Mit dem **ANIVET Wundfix System**, unserem innovativen **Wundverschluss-System** als **Stent-Bandage**, bieten wir Ihnen eine praxiserprobte Lösung zur effektiven Unterstützung des Heilungsverlaufs nach einer Laparotomie.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- **Zuverlässiger Wundschutz** während des gesamten Klinikaufenthalts – auch wenn die Pferde sich in der Box legen, bleibt die Wunde vor Kontaminationen geschützt
- **Einfacher Wechsel der Wundabdeckung** bei täglicher Wundkontrolle
- **Effektive Ödemprophylaxe** durch gleichmäßige Druckverteilung
- **Förderung einer komplikationsfreien Heilung**, schnellere Rekonvaleszenz und potenziell verkürzte Aufenthaltsdauer

**Verlassen Sie sich auf ANIVET** – für eine sichere Wundheilung ohne Komplikationen nach Kolikchirurgie und einen schnelleren Weg zurück zur Gesundheit.

### Zeitpunkt der Anwendung:

Nach oder während des Hautverschlusses der Laparotomiewunde.

### Schritt-für-Schritt-Anleitung:

#### 1. Platzierung der Basiseinheiten:

- Bringen Sie je eine dreifache Basiseinheit auf jeder Seite der Wunde an – etwa **4 cm vom Wundrand entfernt**.
- Das **Langloch** der Basiseinheit (für den Spanngurt) sollte **zur Wunde hin** ausgerichtet sein.

#### 2. Fixierung der Basiseinheit:

- Verwenden Sie einen **monofilen Faden 1 USP** (z. B. *Monosyn® 1 USP*, scharfe Nadel).
- Nähen Sie die Basiseinheit mit einer **fortlaufenden Naht** durch die vorgesehenen Lochungen am Rand fest.

#### 3. Systemgröße wählen:

- Je nach Länge der Wunde benötigen Sie **ein bis zwei ANIVET-Wundfix-Systeme**.

#### 4. Anbringen der Wundabdeckung und des Spanngurts:

- Legen Sie die sterile Wundauflage über die Naht.
- Führen Sie den **Spanngurt durch die Langlöcher beider Basiseinheiten** und befestigen Sie die Abdeckung mit leichtem Zug.

#### 5. **Postoperative Schutzmaßnahme:**

- **Während der Aufstehphase** nach der OP sollte ein **Bauchverband** angelegt werden, um das System zusätzlich zu stabilisieren.

#### 6. **Weitere Versorgung:**

- Entfernen Sie den Bauchverband nach dem sicheren Aufstehen.
- Ab diesem Zeitpunkt kann die **Wundabdeckung täglich oder alle 2 Tage** gewechselt werden.

#### 7. **Entfernung des Systems:**

- Das ANIVET-Stent-Bandage kann **bis zu 10 Tage postoperativ** verbleiben.
- Zur Entfernung: Wundumgebung reinigen, Fäden durchtrennen, Basiseinheiten vorsichtig abnehmen.

---

#### **Hinweis:**

Das ANIVET-System ist für die einmalige Anwendung konzipiert. Bitte aseptische Bedingungen bei Anbringung und Verbandwechsel einhalten.





